


Kurzanleitung CADScor® System

Bitte beachten Sie das CADScor® System Benutzerhandbuch DE-Version 9.0, 15. April 2017.

1 Vorbereitung

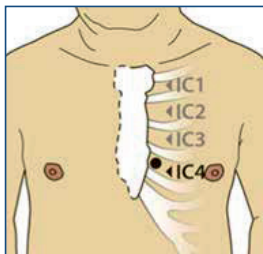


- Patient darf keine bekannte Herzerkrankung haben¹.
- Patient sollte einen Puls < 90 BPM haben, ggf. Patienten ruhen lassen.
- Identifizieren und markieren Sie den IC4-L-Bereich und entfernen Sie ggf. im IC4-L/Patch-Bereich die Haare.

2 System vorbereiten



- Bereiten Sie den Sensor vor.
- Neues Patch mit Sensor verbinden.

3 System am Patienten aufkleben

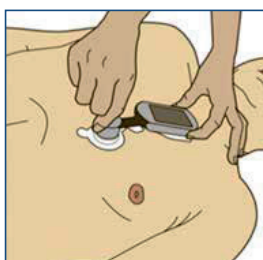


- CADScor® System am IC4-L anbringen.
- Erklären Sie dem Patienten die Aufzeichnungssequenz, den Atmungsmodus und die akustischen Anweisungssignale.

4 Messung durchführen



- Den Anweisungen auf dem Display folgen.
- Patient bis zur Anzeige des CAD-scores ruhen lassen, ggf. Messung wiederholen.

5 Ende der Messung

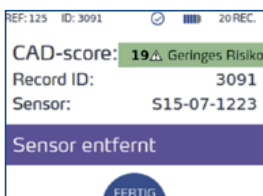

- CAD-score wird angezeigt.
- Gerät und Patch entfernen.