

Meliseptol® HBV-Tücher

Alkoholische Desinfektionstücher

KS **Medizintechnik**
seit 1921

Telefon: 0800 - 10 10 871

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

EIGENSCHAFTEN

- Gezielte Wischdesinfektion von kleinen, alkoholbeständigen Flächen
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA und TbB) und fungizid (inkl. Schimmelpilze); begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro-, Rotaviren), wirksam gegen Polyoma- und Polioviren
- Schnell wirksam innerhalb 1 Min.* (gem. DGHM/VAH und begrenzt viruzid PLUS)
- Getränkt mit Meliseptol® rapid Flüssigkeit
- Aldehydfrei und frei von Aminen
- Hygienische Einzelentnahme durch praktische Spenderbox
- Box wiederverwendbar durch Nachfüllpackung
- Dermatologisch getestet
- Listung: Meliseptol® rapid ist DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste



begrenzt viruzid PLUS

WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)**

EINSATZGEBIET	EZ
Flächendesinfektion gemäß DGHM/VAH bakterizid/levurozid	1 Min.*
tuberkulozid	30 Sek.
Schimmelpilze (A. brasiliensis)	15 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	1 Min.
begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Rota- und Noroviren)	1 Min.
Polyomaviren	5 Min.
Polioviren***	10 Min.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Flächen wischen, sodass sie vollständig mit der Wirkstofflösung benetzt sind. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden.

Alkoholempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vor der Desinfektion auf ihre Beständigkeit gegenüber der Wirkstofflösung prüfen. Behälter nach Gebrauch dicht geschlossen halten.

LIEFERFORM	Art.-Nr.	PZN
Spenderbox mit 100 Tüchern	18706	01889406
Nachfüllpackung mit 100 Tüchern	18707	01889412

* Der kürzestmögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.

** Ermittelt mit der Tränkflüssigkeit Meliseptol® rapid

*** phase 2 step 2 - praxisnaher Carrier-Test

Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: weiße Tücher
Geruch: alkoholartig
Flammpunkt: + 31 °C
Dichte: 0,91 g/ml bei 20 °C

Hinweis:

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Meliseptol® HBV-Tücher – Auszug aus den Produktinformationen

100 Tücher sind mit 211 g Lösung Meliseptol® rapid getränkt.
100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 50,0 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,075 g sowie Duft- und Hilfsstoffe. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nicht ionische Tenside, Parfum.