

Meliseptol® rapid

Alkoholische Schnelldesinfektion für kleine Flächen

KS **Medizintechnik**
seit 1921

Telefon: 0800 - 10 10 871

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

EIGENSCHAFTEN

- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- Frischer Geruch
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA, TbB) und fungizid (inkl. Schimmelpilze); begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren) und wirksam gegen Polioviren
- Einwirkzeit: 1 Minute (gem. DGHM/VAH und begrenzt viruzid PLUS)
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar

DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

begrenzt viruzid PLUS



WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	NORM	EZ
Flächendesinfektion gemäß DGHM/VAH bakterizid/levurozid	EN 13697 EN 16615 (4-Felder-Test)	1 Min.*
tuberkulozid	EN 14348	30 Sek.
Schimmelpilze (A. brasiliensis)	EN 1275	15 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)	EN 14476 DVV/RKI	1 Min.
begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren und Adeno-, Noro-, Rotaviren)	EN 14476 DVV/RKI	1 Min.
Polyomaviren	DVV/RKI	5 Min.
Polioviren	phase 2 step 2 -praxisnaher Carrier Test	10 Min.

* Der kürzest mögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.

Physikalisch-chemische Daten	Hinweis:
Aussehen: klare Flüssigkeit	Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Geruch: alkoholartig	
Dichte: 0,91 g/ml bei 20°C	
pH-Wert: ca. 7,0	
Flammpunkt: +31°C	
Meliseptol® rapid – Auszug aus den Produktinformationen	
100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 50,0 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,075 g sowie Duft- und Hilfsstoffe. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5% nicht ionische Tenside, Parfum. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: entzündlich. Nicht in offene Flamme sprühen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Gefahr erster Augenschäden (nach Augenkontakt sorgfältig mit viel Wasser ausspülen). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 31°C Flammpunkt nach DIN 51755. Ausbringung max. 50 ml/m².	

HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Meliseptol® rapid aus der Dosierflasche auf ein Einmaltuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mithilfe der Sprühflasche einsprühen und das Desinfektionsmittel mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden. Alkoholempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol® rapid prüfen.

Meliseptol® rapid führt in der praktischen Anwendung nicht zu unerwünschten Hautreaktionen durch hautreizende oder sensibilisierende Wirkung (Dermatologisches Fachgutachten, Dermatest Münster, 07/2002).

LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
250 ml-Sprühflasche	20	18564	01264592
250 ml-Dosierflasche	20	18566	01264534
1000 ml-Handsprühflasche*	10	18565	01264586
1000 ml-Flasche	10	19108	00241413
5 Liter-Kanister	1	18567	01264600
Sprühkopf für 1000 ml-Flasche	1	6510094	02182034

* Sprühkopf bitte zusätzlich bestellen

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de