

# CLEANISEPT®



PREVENT

FLÜSSIGES KONZENTRAT ZUR FLÄCHENDESINFEKTION UND REINIGUNG

1 / 9

Gute Desinfektions- & Reinigungsleistung  
**in einem Schritt**

Überzeugt mit einer guten Materialverträglichkeit  
**insbesondere auf alkoholempfindlichen Flächen**

Verzicht auf den Zusatz  
**von Farb- und Duftstoffen**



**KS** Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

**HIER GÜNSTIG KAUFEN**

[www.ksmedizintechnik.de](http://www.ksmedizintechnik.de)

VAH

IHO

ÖGHMP

## FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

# CLEANISEPT®



PREVENT

## PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 9

**CLEANISEPT** ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten. **CLEANISEPT** ist auf quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut. Es ist parfümfrei, enthält weder Aldehyde noch Phenole und zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft aus.

**CLEANISEPT** ist hervorragend geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen. Es ist besonders geeignet für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. **CLEANISEPT** hat eine gute Materialverträglichkeit und ist auch für Acrylglas geeignet.

## ANWENDUNGEN UND HINWEISE

### Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Zur Flächendesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

### Anwendungsgebiete gemäß EU-Medizinprodukteverordnung

Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten.

### Anwendung

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten CLEANISEPT Gebrauchslösung vollständig benetzen und diese mechanisch verteilen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung unter Berücksichtigung der Einwirkzeit wieder genutzt werden.

Konzentrat - nur verdünnt anwenden! Die Gebrauchslösung in der gewünschten Konzentration mit Wasser geeigneter Qualität (max. 40 °C) ansetzen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Anwendungshinweise

Einsatz in Vliestuchspendersystemen: CLEANISEPT eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den ONE SYSTEM Vliestuchspendersystemen oder einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den DESCO/ECO WIPES-Vliestuchspendersystemen.

### Zusammensetzung

100 g enthalten: 6,66 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid. Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): Enthält 5 - 15 % kationische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside.

### Materialverträglichkeit

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten. (siehe Seite 4 – 7)

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

### Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

# CLEANISEPT®



PREVENT

## WIRKUNGSSPREKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 9



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			1 min	5 min	15 min	30 min	60 min
<b>Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion</b>							
bakterizid <sup>1</sup> , levurozid <sup>1</sup>	VAH EN 16615*	mit Mechanik, hohe Belastung	7,5 % <sup>2</sup>		2,5 %	1 %	
begrenzt viruzid	EN 14476*	niedrige und hohe Belastung	7,5 %		2 %		1 %
<b>Ergänzende Prüfergebnisse</b>							
bakterizid	EN 13697*	hohe Belastung		0,75 %			
	EN 13727*	hohe Belastung		3 %	1,5 %	1 %	
	EN 16615*	hohe Belastung	7,5 %		2,5 %	1 %	
	EN 17387*	hohe Belastung		2 %			
	EN 1276	hohe Belastung		0,5 %			
	EN 1276	niedrige Belastung		0,25 %			
levurozid (C. albicans)	EN 13624*	hohe Belastung	3 %	0,75 %	0,5 %		
	EN 13624*	niedrige Belastung		0,25 %	0,1 %		
	EN 13697* (modifiziert)	hohe Belastung		2 %			
	EN 16615*	hohe Belastung	7,5 %		2,5 %	1 %	
	EN 17387*	hohe Belastung		4 %	3 %		
	EN 1650	hohe Belastung		0,75 %	0,25 %		
	EN 1650	niedrige Belastung		0,25 %			
wirksam gegen Polyomaviren	EN 14476	hohe Belastung		5 %		2 %	
wirksam gegen Noroviren	EN 14476*	hohe Belastung					7,5 %

<sup>1</sup> – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

<sup>2</sup> – VAH gelistet 5 Min. Wert

\* Übereinstimmung mit dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereichs dieser Norm berechtigt zu der Annahme, dass eine Übereinstimmung mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte gegeben ist.

FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

CLEANISEPT®



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

4 / 9



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2A			•	Medizinische Transportstühle
Edelstahl V4A			•	Toilettenstühle
verchromtes Messing			•	Rollatoren
Aluminium (2%)			•	
Aluminium (Konzentrat)	•			
Kupfer	•			
Messing	•			



MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 9



MATERIAL <b>KUNSTSTOFFE: ELASTOMERE</b>	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN <b>PRODUKTBEISPIELE</b>
PUR (Polyurethan)			•	Medizinische Transportstühle
Silikon			•	Beatmungsmasken
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse
Latex			•	
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)		•		
CR (Chloropren-Kautschuk)		•		

## CLEANISEPT®



### MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

6 / 9



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PE-HD (Polyethylen-High Density)			•	Lager- und Transportbehälter
POM (Polyoxymethylen)			•	Sitzschalen
PA (Polyamid)			•	Röntgenschürzen
PSU (Polysulfon)			•	Gehäusekomponenten
PVC (Polyvinylchlorid)			•	
PMMA (Polymethylmethacrylat)			•	Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)	•			Ultraschallgeräte
	•			EKG-Geräte
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)	•			Patientenüberwachungsmonitore
	•			Medizinische Tastaturen und Mäuse

CLEANISEPT®



MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

7 / 9



MATERIAL TEXTILIEN UND OBERFLÄCHEN	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Kunstleder (z.B. mit PVC und PUR-Deckschicht)			●	Untersuchungs- und Behandlungsliegen
			●	Gynakologischer Untersuchungsstuhl
PVC (Polyvinylchlorid)			●	Dentalstühle
Holzfußboden			●	OP-Liegen
Linoleum		●		Fußboden

## FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

# CLEANISEPT®



PREVENT

### HERSTELLERFREIGABEN

8 / 9



# Honeywell

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  CE 0482

### GEBINDE

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
CLEANISEPT	Dosierflasche	10	1 L	00-204-010	01834724
	Flasche	6	2 L	00-204-020-01	16202237
	Kanister	3	5 L	00-204-050	01834747
	Kanister	1	10 L	00-204-100	01834753

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.

### ZERTIFIZIERUNGEN



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.



## FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

# CLEANISEPT®



PREVENT

## PRODUKTFAMILIE IM ÜBERBLICK

9 / 9



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT



## EMPFOHLENE VLIESTUCHSPENDERSYSTEME



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES