



Instrumentenpflege & Spezialprodukte

SPEZIAL ÖLSPRAY

Pflegespray für Instrumente

- Auf der Basis medizinischer Weißöle
- Zur Instrumentenpflege vor der Dampfsterilisation
- Optimale Schmierung beweglicher Teile



Produktbeschreibung

SPEZIAL ÖLSPRAY ist ein Pflegespray für medizinische Instrumente, insbesondere für Gelenkinstrumente wie z.B. Gelenke und Hähne von starren Endoskopen. Das spezielle Sprühventil sorgt für einen feinen, gleichmäßigen Schutzfilm. Dieser bedingt die hohe Dampfdurchlässigkeit von **SPEZIAL ÖLSPRAY** und erlaubt eine sichere und effektive Sterilisation im Dampfsterilisateur. **SPEZIAL ÖLSPRAY** erhöht die Werterhaltung der Materialien durch eine optimale Schmierung beweglicher Teile und einen wirksamen Korrosionsschutz. Aufgrund der Verwendung reiner medizinischer Weißöle ist **SPEZIAL ÖLSPRAY** äußerst materialverträglich und toxikologisch unbedenklich nach Arznei- und Lebensmittelrecht.

Anwendungsgebiete

Zur Pflege von chirurgischen Instrumenten, Stahlwaren aller Art, luft- und kugelgelagerten Turbinen, Hand- und Winkelstücken sowie von Gelenken und Hähnen von starren Endoskopen. Optimale Schmierung der beweglichen Teile vor der Dampfsterilisation.

Anwendung

Turbinen oder Hand- und Winkelstücke zweimal täglich bzw. vor jedem Autoklavieren mit **SPEZIAL ÖLSPRAY** ca. 1 Sek. durchsprühen und abwischen. Dose dabei senkrecht halten. Instrumente: Im halb geöffneten Zustand aus ca. 25 cm Entfernung einsprühen. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Unbedingt Abstand einhalten und nur einen dünnen Ölfilm aufsprühen. **SPEZIAL ÖLSPRAY** kann bei Latex- und Gummiteilen Quellung verursachen.

Zusammensetzung

Medizinisches Weißöl nach DAB 10 (Paraffinum liquidum), Treibgas Propan/Butan.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von **SPEZIAL ÖLSPRAY** ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Polycarbonat (PC) und Chloropren (CR/SPR).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
SPEZIAL ÖLSPRAY	500ml Spraydose	500ml	12	00-108-005	15882595



DE 05/2021

