

# VENTISEPT PUR WIPES

- » Alkoholische, parfümfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen
- » Auch für Touchscreens & Displays\* geeignet
- » Zugelassen für den Futter- und Lebensmittelbereich
- » Vliestuch zu 100 % biologisch abbaubar und zu 100 % plastik- & mikroplastikfrei
- » Hautverträglichkeit



**Anwendungsgebiete:**

**Gemäß EU-Medizinprodukte-Verordnung:** Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht-invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

**Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

Besonders geeignet für Displays, Tastaturen und Bedienfelder von empfindlichen medizinischen Geräten.

**Anwendung:**

Flächen mit ventisept pur wipes bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen

schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

**Zusammensetzung:**

100 g Tränklösung enthalten als wirksamen Bestandteil: 45 g Ethanol

**Materialverträglichkeit:**

Die Anwendung von ventisept pur wipes wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA).

**ACHTUNG:**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

**Haltbarkeit nach Anbruch:**

42 Tage

**Inhalt:**

100 Blatt (ca. 20 x 20 cm)

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

\*nicht auf Acrylglas, Aluminium, Messing und PET-Oberflächen anwenden. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten	gemäß	30 Sek.	1 Min.	2 Min.	3 Min.
Bakterizid, levurozid	VAH / EN 16615			■	
Mykobakterizid (M.avium und M. terrae)	EN 14348		■		
Tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	■			
Begrenzt viruzid	EN 14476		■		
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476				■
<b>Ergänzende Prüfergebnisse:</b>					
Wirksam gegen Noro-Viren (MNV)	EN 14476	■			
Wirksam gegen Rota-Viren	EN 14476	■			
Wirksam gegen Adeno-Viren	EN 14476				■

HE323DS-T100-2\_DE.pdf 03/2023



**REF** HE323DS-T100-2

**CE** 0482 **MD** Medizinprodukt