

Alkoholische Tücher zur Flächen-Schnelldesinfektion

VENTISEPT WIPES RTU

- ✓ rückstandsfreie Abtrocknung
- ✓ mit angenehmem Duft
- ✓ umfassende Wirksamkeit

Ventisept wipes RTU sind gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektions-Tücher zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung: Schnell-desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnell-desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung:

Flächen mit ventisept wipes RTU bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. ventisept wipes RTU sind vorgesehen für die Verwendung mit wieder befüllbaren Tuchspendersystemen wie z. B. ventiwipes. Angaben zur Befüllung und Aufbereitung der Tuchspendersysteme sind zu beachten. Nach jeder Tuchentnahme ist das Tuchspendersystem unmittelbar wieder zu verschließen. Hinweis: Für alle alkoholbeständigen Flächen geeignet.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Haltbarkeit nach Anbruch:

28 Tage

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol, enthält Duftstoffe

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von ventisept wipes RTU wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyethylenterephthalat (PET).

ACHTUNG:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH/EN 16615.....	5 Min.
Tuberkulozid (M.terrae) gem. EN 14348.....	30 Sek.
Mykobakterizid (M. avium und M. terrae) gem. EN 14348.....	1 Min.
Begrenzt viruzid gem. 14476.....	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS gem. EN 14476.....	3 Min.
Ergänzende Prüfergebnisse:	
Wirksam gegen Noroviren (MNV) gem. EN 14476.....	1 Min.
Wirksam gegen Adenoviren gem. EN 14476.....	3 Min.
Wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476.....	30 Sek.

Verfügbare Gebindegrößen	Blattgröße	REF	Stück / Karton	Stück / Palette
ventisept wipes RTU pink grapefruit 70 Blatt	25x25 cm	323070G	3 Rollen	288 Rollen
ventisept wipes RTU honigmelone 70 Blatt	25x25 cm	323070H	3 Rollen	288 Rollen
ventisept wipes RTU pink grapefruit 90 Blatt	30x32 cm	323090G	3 Rollen	150 Rollen
ventisept wipes RTU honigmelone 90 Blatt	30x32 cm	323090H	3 Rollen	150 Rollen

ACHTUNG



Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.ihoviruzidie-liste.de).

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. N-78272 (Pink Grapefruit), N-78271 (Honigmelone)

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Stand der Information: 2022-08

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de

CE 0482

MD