



Schneller Einsatzbereitschaftstest

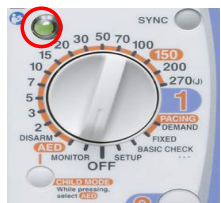

Defibrillator einsatzbereit!

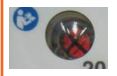

Defibrillator nicht einsatzbereit!

Die Statusanzeige informiert über die tägl. und monatl. Selbsttestergebnisse.


Detaillierte Testergebnisse können im BASIS TEST überprüft werden.

Klassisches 3-Schritt-Design für intuitive Bedienung



- 1** Wählen Modus/Energie
- 2** Laden
- 3** Schocken

Schneller Wechsel auf Einmal-Pads

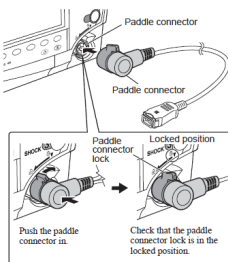

1. Stellen Sie den Modus auf "OFF".
2. Drücken Sie den schwarzen Drehknopf nach links um den Paddle Konnektor zu lösen.
3. Schließen Sie die Einmal-Pads an.

Schneller Wechsel in den Kinder-Modus für AED

To enter AED (CHILD MODE)


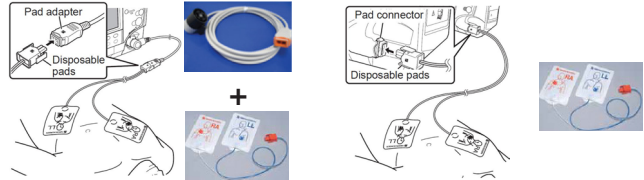
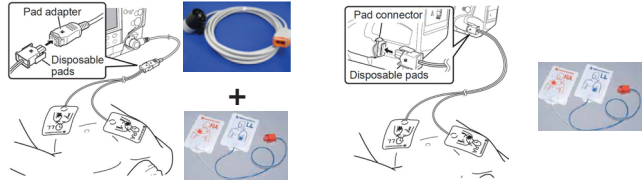

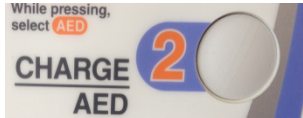



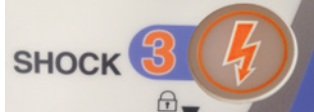
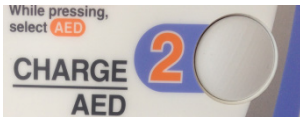
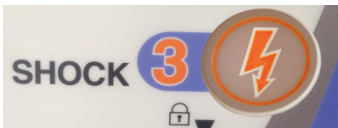


While holding the CHILD MODE button pressed, set the control dial to AED.

1. Stellen Sie den Modus auf "AED".
2. Drücken Sie gleichzeitig auf die "KINDER MODUS" Taste.
3. Überprüfen Sie ob der "KINDER MODUS" auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.


Zubehör

Zubehör	Artikel-Nummer	Beschreibung
	X065	Batterie; 1 Stück
	A128	Thermopapier, 50 mm x 30 m; 10 Stück
	K922	EKG-Verbindungskabel; 1 Stück
	K912/K915	6-Kanal EKG-Kabel, Klemme/Druckknopf; 1 Stück
	K342B	Adapterkabel für Einmal-Pads; 1 Stück
	G203	EKG Elektroden, 150 Stück
	H329/H330	Einmal-Pads Erwachsene/Kinder; 10 Stück
	P907	ETCO ₂ Sensor Kit für intubierte & nicht-intubierte Patienten; 30 Stück
	R804/V923	CO ₂ Adapter für intubierte/nicht-intubierte Patienten; 30 Stück
	K931	SpO ₂ Verbindungskabel; 1 Stück
	P225F	SpO ₂ Fingersensor; 1 Stück
	F015	Defibrillationsgel; 1 Stück


Manuelle Defibrillation	AED Erwachsenen Modus	AED Kinder Modus
<p>(1) Energie wählen</p> 	<p>(1) Anschließen der Erwachsenen Einmal-Pads</p> <p>TEC-5621/5631 TEC-5611</p> 	<p>(1) Anschließen der Kinder Einmal-Pads</p> <p>TEC-5621/5631 TEC-5611</p> 
<p>(2) Laden</p> <p>Laden am Paddle Laden am Gerät</p>  	<p>(2) AED Modus auswählen</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Modus auf "AED" stellen 	<p>(2) AED Modus auswählen</p>  <ul style="list-style-type: none"> • "AED" Modus einstellen • Drücken Sie gleichzeitig auf die "KINDER MODUS" Taste • Überprüfen Sie ob der "KINDER MODUS" auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird
<p>(3) Schocken</p> <p>Entladen an den Paddles Entladen am Gerät</p>  	<p>(3) Laden</p>  <p>← am Gerät drücken →</p>	<p>(4) Schocken</p> 

Externer Schrittmacher TEC-5631

(1) Pads anschließen

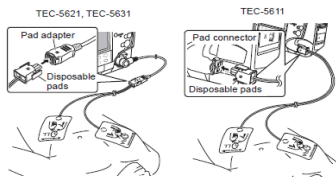

(4) Einstellen der Stimulationsrate

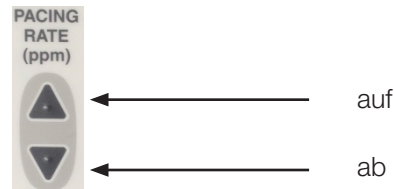

Kinder AED Modus

(1) BASIS TEST wählen




(2) Schrittmacher-Modus wählen

Fixiert oder Demand




(5) Start/Stop Stimulation

drücken oder auf 0mA einstellen

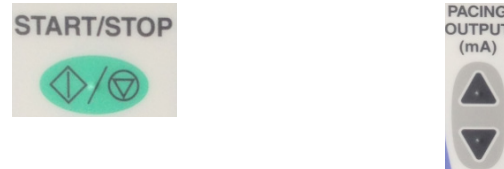

(2) mit „START“ bestätigen

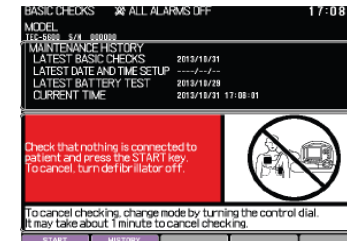

(3) EKG Kabel und EKG Elektroden anschließen



(6) Stimulationsfrequenz erhöhen



(3) Einstellungen überprüfen

