

# seca 877

Flachwaage für den  
mobilen Einsatz (III)



- Mutter-Kind-Funktion für problemloses Wiegen von Kleinkindern.
- Große Nivellierfüße für hohe Standfestigkeit.
- Leicht zu transportieren durch sehr geringes Eigengewicht von 4,2 kg.
- Batterie-Stromversorgung für Standorte ohne Steckdose.

**seca 877:**

Nur 4,2 Kilogramm.

**W**aagen, die in der Medizin mobil eingesetzt werden, müssen leicht sein, stabil, gut zu reinigen und komfortabel. Die seca 877 besttigt das mit einem Gewicht von 4,2 Kilogramm, robusten Materialien und der wichtigen Mutter-Kind-Funktion.

**Ausgezeichnete  
Oberflchenhrte.**

Die Basis besteht aus einem Gemisch aus Kunststoff und Plexiglas. Eine Kombination, die ein Material mit extremer Oberflchenhrte und Schlagfestigkeit gewhrleistet, das mit allen handelsublichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden kann. Daruber hinaus ist die seca 877 mit zustzlichen Stahlelementenverstrkt, damit auch Personen bis zu 200 Kilogramm gewogen werden konnen.

**Standfest auf allen  
Untergrunden.**

Vier groe Nivellierfue unter der Wiegebasis garantieren, dass die seca 877 selbst auf schwierigen Untergrunden sicher steht. Eine Manahme, die zustzlich auch die Messgenauigkeit erhohet. Ebenso wichtig ist die geringe Hohe der Waage von unter sechs Zentimetern. Denn die flache Bauweise gewhrleistet, dass auch Menschen mit Bewegungseinschrnkungen problemlos die rutschfeste Trittplche betreten konnen.

**Komfortabel zu bedienen.**

Obwohl das Anzeige- und Bedienelement in der Waage integriert ist, kann die seca 877 bequem bedient werden. Zum Einschalten genugt es, kurz die Trittplche anzutippen. Auch Suglinge und Kleinkinder konnen einfach auf dem Arm eines Elternteils oder des Pflegepersonals gewogen werden. Dazu muss sich der Erwachsene nur vorher separat wiegen. Das Trieren des Gewichts ubernimmt die Mutter-Kind-Funktion, die mit einem Knopfdruck eingeschaltet werden kann.




Groes Display fur leichtes Ablesen.



Groe Nivellierfue an der Unterseite der Wiegebasis fur sicheres Aufstellen.



Tip-on Einschaltautomatik.

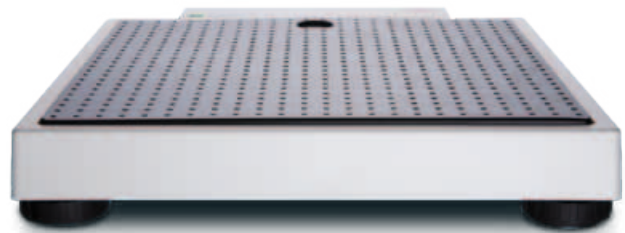

Flache Bauweise und rutschfeste Trittplche fur bequemes Betreten.

**seca 877****Technische Daten**

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Mae (BxHxT): 321 x 60 x 356 mm
- Mae/Plattform (BxHxT): 288 x 60 x 278 mm
- Eigengewicht: 4,2 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Funktionen: Mutter/Kind-Funktion, Tip-on Einschaltautomatik, Abschaltautomatik
- Optional: Messstab seca 217 in Kombination mit Adapterelement seca 437, Transporttasche seca 414 (fur Kombination mit Messstab und Adapterelement) und seca 421
- Eichklasse:  $\text{M}_1$